


Opatrunki specjalistyczne Coloplast

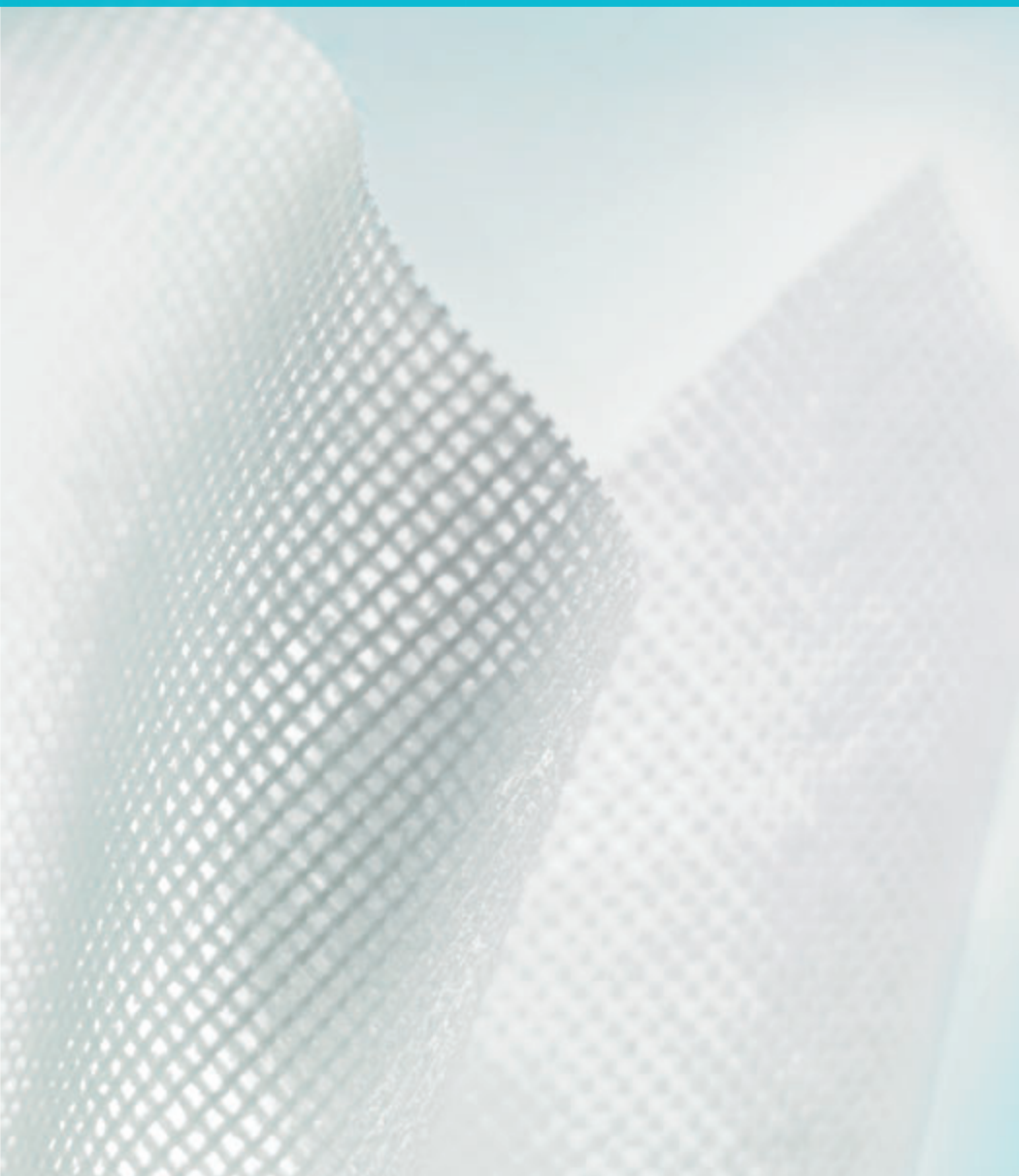



Co robimy

Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami o bardzo osobistym charakterze.

Bliska współpraca z użytkownikami daje nam możliwość dopasowania się do ich indywidualnych potrzeb w ramach intymnej opieki zdrowotnej. Użytkownicy naszych produktów znajdują się często w szczególnym stanie medycznym. Jest on bardzo intymny i osobisty, nierzadko związany z bolesnymi przeżyciami i brakiem możliwości publicznej wymiany informacji. Nasze produkty i sposób, w jaki działamy, ułatwiają życie użytkownikom i ich opiekunom.

Specjalizujemy się w opiece stomijnej, urologicznej oraz w dostarczaniu rozwiązań związanych z gojeniem się ran i pielęgnacją skóry.

Pracujemy na całym świecie zatrudniając około 10 000 osób.

Nasza misja

Uczynić łatwiejszym życie ludzi z potrzebami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej.

Jesteśmy blisko naszych użytkowników. Słuchamy, by lepiej rozumieć potrzeby i odpowiadamy, aby znaleźć nowe rozwiązania. Chcemy być jak najbardziej innowacyjni i najszybsi we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań medycznych.



Nasze wartości

Wartości firmowe definiują sposób, w jaki myślimy i działamy, zarówno jako jednostki, jak i organizacja.

Bliskość

Im bardziej intymne są dolegliwości, tym ważniejsze jest, by być blisko dotkniętej nimi osoby i tworzyć rozwiązania, które uwzględniają jej szczególne potrzeby.

Bliskie relacje ze wszystkimi klientami – użytkownikami, jak również pracownikami służby zdrowia – są jednymi z naszych najważniejszych celów. Bliskość wymaga umiejętności słuchania, empatii i zobowiązania się do działania we właściwy w danej sytuacji sposób.

Pasja

Widzieć, że nasze działanie wprowadziło realną, pozytywną zmianę w jakości życia innej osoby – to jedno z najbardziej satysfakcjonujących uczuć.

Wprowadzanie prawdziwej zmiany w życie ludzi, którzy używają naszych produktów jest naszą największą nagrodą. Pasja motywuje nas do znajdowania nowych dróg i zachęca do szybkiego wprowadzenia najlepszych pomysłów na rynek. Jednocześnie potrzebujemy jej, by tworzyć wymagające, inspirujące i przyjazne środowisko pracy.

Szacunek i odpowiedzialność

Są one podstawą bliskich relacji z klientami. Musimy być szczerzy i otwarci we wszystkim, co robimy.

Mamy głęboki szacunek do osobistej i intymnej natury dolegliwości, z którymi żyją użytkownicy naszego sprzętu. Naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest znajdowanie nie tylko rozwiązań medycznych, ale również sposobów na zmniejszenie bolesnych odczuć, likwidowanie barier w przepływie oficjalnych informacji i poczucia odrzucenia związanych z tym stanem.

Szacunek do każdego i do świata wokół nas, zawsze będzie sukcesem kultury Coloplast.

Przewodnik leczenia ran refundowanymi opatrunkami Coloplast













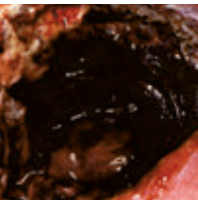

Legenda:



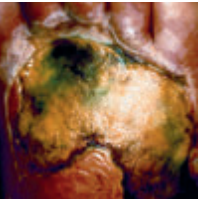














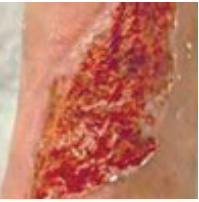
























👉 – mały wysięk

👉👉 – średni wysięk

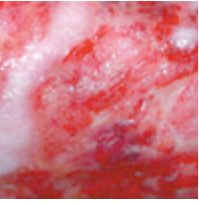👉👉👉 – duży wysięk

👉👉👉👉 – bardzo duży wysięk

	Rany niezakażone	Rany zakażone /zagażowane zakażeniem	Wysięk
 <p>Tkanka martwicza. Czarna powierzchnia, często o suchej i twardej konsystencji.</p>	 <p>Purilon + Comfeel Podstawowy</p>	 <p>Purilon + Biatain Ag</p>	👉
	 <p>Purilon + Biatain</p>	 <p>Purilon + Biatain Ag</p>	👉👉
 <p>Tkanka martwicza i włóknista. Czarna i żółta powierzchnia, często o suchej i twardej konsystencji. Więcej wysięku niż w ranie martwiczej.</p>	 <p>Purilon + Comfeel Podstawowy</p>	 <p>Purilon + Biatain Ag</p>	👉
	 <p>Purilon + Biatain</p>	 <p>Purilon + Biatain Ag</p>	👉👉
	 <p>Purilon + Biatain</p>	 <p>Purilon + Biatain Ag</p>	👉👉👉

	Rany niezakażone	Rany zakażone /zagrożone zakażeniem	Wysięk
 <p>Tkanka włóknista i ziarninowa. Żółta i czerwona powierzchnia.</p>	 Biatain	 +  Biatain Alginate Ag Comfeel Podstawowy	
	 Biatain	 +  Physiotulle Ag Biatain	
	 Biatain	 Biatain Ag	
	 Biatain Super	 /  +  Biatain Ag Biatain Alginate Ag Biatain Super	
 <p>Tkanka ziarninowa. Czerwonokrwista, nierówna powierzchnia z ziarniną.</p>	 Biatain	 +  Biatain Alginate Ag Comfeel Podstawowy	
	 Biatain	 +  Physiotulle Ag Biatain	
	 Biatain	 Biatain Ag	
	 Biatain Super	 /  +  Biatain Ag Biatain Alginate Ag Biatain Super	
 <p>Tkanka pokryta nabłonkiem. Faza gojenia, nowa i różowa skóra z niewielkim wysiękiem.</p>	 Comfeel Podstawowy	 +  Biatain Alginate Ag Comfeel Podstawowy	
	 Biatain	 Biatain Ag	



Biatain® Przylepny Biatain® Nieprzylepny

Większa chłonność dla skóry wrażliwej



Dla ran otoczonych wrażliwą skórą, niezakażonych, z obfitym wysiękiem, tj. owrzodzeń podudzi, odleżyn, owrzodzeń cukrzycowych, oparzeń II stopnia i miejsc pobrania tkanek do przeszczepu.

Biatain® Przylepny i Nieprzylepny to miękkie opatrunki piankowe, które skutecznie absorbują i zatrzymują wysięk z rany. Zapewnia to zachowanie optymalnego poziomu wilgotności dla gojenia ran.

- Lepsza absorpcja i zatrzymywanie wysięku minimalizują ryzyko maceracji i wycieku. Do stosowania na rany otoczone nawet bardzo wrażliwą skórą.
- Opatrunki Biatain® są miękkie i elastyczne, co czyni je bardzo wygodnymi w stosowaniu. Ścięte krawędzie zmniejszają ryzyko odciśnięć na skórze, a warstwa hydrokoloidu utrzymuje je we właściwym miejscu.
- Unikalna struktura pianki 3D pochłania wysięk pionowo i blokuje go wewnątrz swojej struktury, utrzymując optymalnie wilgotne środowisko leczenia rany.
- Opatrunek składa się z miękkiego i wygodnego w użyciu półprzepuszczalnego poliuretanu, który umożliwia wymianę gazową, jednocześnie chroniąc przed bakteriami z zewnątrz.



Opatrunki piankowe



10 x 10 cm

15 x 15 cm

Biatain® Nieprzylepny

Nieprzylepne opatrunki piankowe Biatain, skutecznie absorbują i zatrzymują wysięk z rany. Zapewnia to zachowanie optymalnego poziomu wilgotności dla gojenia ran.



7,5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

Biatain® Przylepny

Przylepne opatrunki Biatain, podobnie jak opatrunki nieprzylepne zapewniają zachowanie optymalnego środowiska dla gojenia się ran. Jest to możliwe dzięki bardzo skutecznej absorpcji i zatrzymywaniu wysięku oraz dokładnemu dopasowaniu się do rany.



12,5 x 12,5 cm



18 x 18 cm

Warstwa hydrokoloidowa opatrunków przylepnych Biatain zapewnia dodatkowo lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry.

Opatrunki przylepne Biatain umożliwiają zaopatrzenie ran o bardzo zróżnicowanej wielkości, a wysokim wysięku. Pozwala to zaopatrzyć zarówno małe rany, na przykład palców stóp, jak i większe w okolicach goleni, ud i podudzi.



19 x 20 cm

Biatain® Przylepny Heel

Unikalny kształt przystosowany jest do zaopatrzenia ran znajdujących się w tak trudnym miejscu jak pięta. Wskazany jest do stosowania na rany ze średnim i dużym wysiękiem, a w szczególności w leczeniu owrzodzeń i zespołu stopy cukrzycowej.



23 x 23 cm

Biatain® Przylepny Sacral

Wyjątkowy kształt oraz warstwa hydrokoloidu, która otacza opatrunek, doskonale sprawdza się w leczeniu ran znajdujących się w okolicy krzyżowej. Duży rozmiar 23x23 cm pozwala na zaopatrzenie ran zajmujących dużą powierzchnię.

Opatrunki piankowe ze srebrem



Biatain® Ag Przylepny Biatain® Ag Nieprzylepny

Większa chłonność dla ran zakażonych



Opatentowany kompleks srebra

Niezależne badania wykazały, że Biatain® Ag to opatrunek, który skutecznie zwalcza wszystkie rodzaje bakterii powszechnie występujących w trudno gojących się ranach zakażonych. Zainfekowane rany goją się szybciej przy użyciu Biatain® Ag niż innych opatrunków, w tym innych opatrunków przeciwbakteryjnych.

Unikalna trójwymiarowa struktura pianki Biatain® dla zwiększenia chłonności

W kontakcie z wysiękiem dopasowuje się dokładnie do dna rany, co zwiększa chłonność – nawet pod wpływem ucisku.

- Miękki i elastyczny opatrunek, wygodny w stosowaniu.
- Ścięte krawędzie zmniejszają ryzyko odciśnień na skórze.
- Opatrunki wskazane do stosowania w różnych rodzajach zakażonych ran z obfitym wysiękiem, tj. w owrzodzeniach podudzi, odleżynach, owrzodzeniach cukrzycowych, oparzeniach II stopnia i miejscach pobrania tkanek do przeszczepu.

Sposób działania

Unikalna struktura pianki 3D pochłania wysięk pionowo i blokuje go wewnątrz swojej struktury, utrzymując optymalnie wilgotne środowisko leczenia rany.



Opatrunki piankowe ze srebrem

Opatrunki ze srebrem cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród specjalistów, zajmujących się leczeniem ran. Szeroki asortyment Coloplast umożliwia zaopatrzenie ran nawet o dużych i mniej typowych rozmiarach.



20 x 20 cm

20 x 10 cm

Biatain® Ag nieprzylepny

Opatrunki te występują w czterech rozmiarach. Dzięki wprowadzeniu opatrunków o większej powierzchni możliwe jest zaopatrzenie dużych ran, np. w okolicy ud i podudzi.



18 x 18 cm

Biatain® Ag przylepny

Biatain Ag przylepny składa się z pianki poliuretanowej zawierającej opatentowany kompleks srebra o przedłużonym działaniu oraz dodatkowej warstwy hydrokoloidowej wokół brzegów, która umożliwia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpiecza skórę wokół niej.



23 x 23 cm

Biatain® Ag Sacral przylepny

Biatain Ag Sacral, ze względu na swój unikalny kształt, znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu ran zakażonych oraz zagrożonych zakażeniem znajdujących się w okolicy krzyżowej.



Biatain® Ag Adhesive Heel Biatain® Ag Adhesive Sacral



Większa chłonność dla ran zakażonych
na pięcie i okolicy krzyżowej

Biatain® Ag Adhesive Sacral i Biatain® Ag Adhesive Heel to przylepne opatrunki piankowe ze srebrem przeznaczone do ran zakażonych oraz zagrożonych zakażeniem.

Sposób działania

Biatain® Ag Adhesive Heel ma kształt specjalnie przystosowany do zaopatrzenia ran w tak trudnym miejscu jak pięta, a Biatain® Ag Adhesive Sacral najlepiej sprawdza się w okolicy krzyżowej. Ich budowa pozwala na utrzymanie opatrunku we właściwej pozycji przez cały czas kuracji i odpowiednie działanie jonów srebra na ranę. Doskonale sprawdzają się w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej oraz odleżyn.



Heel

Sacral

Opatrunki alginianowe ze srebrem



Biatain® Alginate Ag

Większa chłonność dla zakażonych ran głębokich



Biatain® Alginate Ag to bardzo chłonny opatrunek alginianowy ze srebrem dla umiarkowanie i silnie sączących ran zainfekowanych i narażonych na ryzyko zakażenia.

- Struktura opatrunku pozwala na przycinanie go w dowolny sposób. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie go do ran o różnych wielkościach, kształtach i głębokościach. Zwiększa to również optymalną kontrolę infekcji.
- Biatain® Alginate Ag zapewnia ciągłe działanie przeciwbakteryjne przez cały okres stosowania. Jest to możliwe dzięki wysokiej chłonności tego opatrunku i formującego się żelu, który zatrzymuje wysięk wewnątrz.
- Biatain® Alginate Ag nie przywiera do rany. Można go usunąć w jednym kawałku, minimalizując ból i uszkodzenia podczas zmiany opatrunku.
- Biatain® Alginate Ag ma potwierdzone działanie hemostatyczne, czyli zdolność do zatrzymania niewielkich krwawień.
- W zetknięciu z wysiękiem z rany opatentowany kompleks srebra uwalnia jony srebra. Pozwala to na skuteczne zwalczanie zakażeń.
- Biatain® Alginate Ag jest opatrunkiem składającym się w 85% z alginianu wapnia, 15% karboksymetylocelulozy (CMC) i opatentowanego kompleksu srebra.



Kompleks Srebra w opatrunkach Biatain Ag

- Jony srebra w opatrunkach Biatain®Ag i Biatain® Alginate Ag umieszczone są w specjalnym Kompleksie Srebra. Kompleks Srebra to fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowy.
- Anion sodowo-wodorowo-cyrkonowo-fosforanowy jest nośnikiem srebra, który został stworzony w celu jak najszybszego dostarczenia jonów srebra do rany.



Jedynie opatrunki Biatain®Ag i Biatain®Alginate Ag zawierają opatentowany Kompleks Srebra. Jest on równomiernie rozprzestrzeniony w strukturze opatrunków.

Biatain Ag w 1 cm² zawiera 0,95 mg jonów srebra. Biatain Alginate Ag w 1 cm² zawiera 0,6 mg jonów srebra.

Inteligentny system uwalniania srebra pomaga przyspieszyć gojenie się ran:

- zwalcza bakterie – dostarcza jony srebra wprost do rany,
- pozwala na kontrolę ilości uwalnianego srebra (jest to zależne od ilości wysięku z rany),
- długotrwale zabezpiecza ranę – nieprzerwanie uwalnia wysokie dawki srebra nawet do 7 dni,
- w testach in vitro wykazano, że w porównaniu do opatrunków konkurencyjnych Biatain®Ag osiąga najwyższe stężenie srebra między 48 h a 168 h od założenia opatrunku.

Opatrunki hydrokapilarne



Biatain® Super

Większa chłonność dla ran o intensywnym wysięku

Biatain® Super to bardzo chłonny opatrunek hydrokapilarny zapewniający optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran z dużym wysiękiem.

Odpowiedni do silnie sączących ran

Szybkie wchłanianie i zatrzymanie wysięku umożliwiają pełne wykorzystanie zdolności absorpcyjnej opatrunku. Jednocześnie minimalizuje ryzyko maceracji i wycieku nawet w przypadku ran silnie sączących.

- Opatrunek hydrokapilarny bardzo szybko wchłania wysięk pionowo, rozprowadzając go jednocześnie poziomo. Warstwa nieprzyklepna przy ranie pomaga w utrzymaniu optymalnego wilgotnego środowiska przyspieszającego gojenie.
- W porównaniu do innych opatrunków silnie absorbujących, Biatain® Super jest optymalnym ekonomicznie rozwiązaniem bez potrzeby stosowania dodatkowych opatrunków wtórnych. Cząstki superabsorbentu wchłaniają i zatrzymują duże ilości wysięku. Wysoce skuteczna wymiana parowa umożliwia lepszą kontrolę wysięku.
- Biatain® Super składa się z superabsorbentu hydrokapilarnego i półprzepuszczalnej hydrokolidowej warstwy samoprzylepnej.



10 x 10 cm



15 x 15 cm



20 x 20 cm

Opatrunki Biatain®

	nazwa	rozmiar (cm)	ilość w op.	refundacja	numer kat.	EAN	BLOZ
	Opatrunek Biatain Poliuretanowy Nieprzylepny	10 x 10	10	TAK	334 100	5 708 932 476 300	9 045 411
		15 x 15	5	TAK	334 130	5 708 932 476 294	9 057 325
	Opatrunek Biatain Poliuretanowy Przylepny	7,5 x 7,5	10	TAK	334 620	5 708 932 861 540	9 073 323
		10 x 10	10	TAK	334 300	5 708 932 861 557	9 073 322
		12,5 x 12,5	10	TAK	334 200	5 708 932 861 571	9 073 333
		18 x 18	5	TAK	334 230	5 708 932 861 564	9 073 324
	Opatrunek Biatain Poliuretanowy Przylepny, na piętę	19 x 20	5	TAK	334 880	5 708 932 861 526	9 073 325
	Opatrunek Biatain Poliuretanowy Przylepny, krzyżowy	23 x 23	5	TAK	334 850	5 708 932 861 533	9 073 326
	Opatrunek Biatain Ag Poliuretanowy ze Srebrem Nieprzylepny	10 x 10	5	TAK	396 220	5 708 932 481 588	9 056 734
		15 x 15	5	TAK	396 250	5 708 932 481 922	9 052 650
		10 x 20	5	TAK	396 230	5 708 932 861 519	9 073 332
		20 x 20	5	TAK	396 260	5 708 932 861 502	9 073 345
	Opatrunek Biatain Ag Poliuretanowy ze Srebrem Przylepny	15 x 15	5	TAK	334 640	5 708 932 551 601	9 061 687
		18 x 18	5	TAK	396 350	5 708 932 861 496	9 073 329
	Opatrunek Biatain Ag Poliuretanowy ze Srebrem Przylepny, na piętę	19 x 20	5	TAK	396 430	5 708 932 551 632	9 061 678
	Opatrunek Biatain Ag Poliuretanowy ze Srebrem Przylepny, krzyżowy	23 x 23	5	TAK	396 410	5 708 932 861 489	9 073 328
	Opatrunek Biatain Alginate Ag Alginianowy ze Srebrem Nieprzylepny	10 x 10	10	TAK	037 600	5 708 932 552 691	9 062 099
		15 x 15	10	TAK	037 650	5 708 932 552 721	9 062 098
	Opatrunek Biatain Alginate Ag Alginianowy ze Srebrem Nieprzylepny, w taśmie	3 x 44	10	TAK	037 800	5 708 932 552 660	9 061 770
	Opatrunek Biatain Super Hydrokapilarny Przylepny	10 x 10	10	TAK	046 100	5 708 932 551 540	9 061 685
		15 x 15	10	TAK	046 150	5 708 932 551 571	9 061 682
		20 x 20	10	TAK	046 200	5 708 932 861 588	9 073 327

Opatrunki hydrokoloidowe



Comfeel® Podstawowy

Ochrona i gojenie ran o małym i średnim wysięku



Doskonałe warunki gojenia

Comfeel Podstawowy jest opatrunkiem hydrokoloidowym zapewniającym optymalne, wilgotne środowisko gojenia się rany. Jest stosowany w leczeniu ran ze średnim i małym wysiękiem.

Sposób działania

W kontakcie z wysiękiem z rany opatrunek Comfeel Podstawowy tworzy lepki żel wchłaniający wysięk, jednocześnie nie przylegający do rany.

Podczas wchłaniania wysięku na powierzchni rany formuje się białawy żel. Kiedy wypełni on górną część opatrunku, Comfeel zmieni swój kolor na marmurkowy lub biały. Wtedy powinna nastąpić zmiana opatrunku.





Comfeel® Plus Profilaktyczny PRD

Efektywna profilaktyka i leczenie odleżyn

Comfeel Plus Profilaktyczny PRD należy do najnowszej generacji opatrunków specjalistycznych. Wysoce zwarta struktura pianki poliuretanowej z odklejaną częścią centralną pozwala na rozłożenie nacisku miejscowego oraz poprawienie warunków krążenia w obrębie rany. Dzięki temu Comfeel Plus Profilaktyczny PRD łączy w sobie cechy opatrunku zmniejszającego nacisk miejscowy z efektywnym gojeniem rany. Jest to szczególnie ważne w leczeniu odleżyn. Wyprofilowany kształt opatrunków ułatwia założenie ich w nawet trudno dostępnych miejscach.

- Comfeel Plus Profilaktyczny PRD zalecany jest w zapobieganiu i leczeniu odleżyn I-IV stopnia.
- Opatrunek o średnicy 7 cm w kształcie „motyla” jest szczególnie polecany na łokiec i pięty, natomiast okrągły na okolicę krzyżową.



Opatrunki hydrokoloidowe z alginianem



Comfeel® Plus

Ochrona i gojenie ran o średnim wysięku

Szybsze gojenie dzięki uszczelnieniu i ochronie rany

Opatrunek hydrokoloidowy Comfeel Plus z alginianem jest łagodnym i potwierdzonym rozwiązaniem wykorzystywanym do uszczelniania i leczenia ran z małym i umiarkowanym wysiękiem.

Wybór pewny i godny zaufania


Od 30 lat stosowanie opatrunku hydrokoloidowego Comfeel Plus jest klinicznie udokumentowane. Obecnie Comfeel Plus to pewne i godne zaufania opatrunki standardowe wybierane przez wiele klinik leczenia ran ze względu na ich skuteczność, wszechstronne zastosowanie i różnorodność.

Może być stosowany jako opatrunek pierwszego wyboru lub jako opatrunek wtórny

Comfeel Plus można stosować bezpośrednio na rany z wysiękiem o nasileniu od niskiego do umiarkowanego w ostatnich stadiach procesu gojenia, a także jako opatrunek pomocniczy.

Dostępny w różnych kształtach dopasowanych do każdej powierzchni ciała

Opatrunki Comfeel Plus są dostępne w postaci kwadratów o różnych wielkościach, jak również w następujących wariantach: do stosowania w okolicy krzyżowej (Sacral), konturowy oraz zmniejszający nacisk wywierany na tkanki (PRD). Szeroka oferta pozwala zaspokoić różne potrzeby pacjentów.

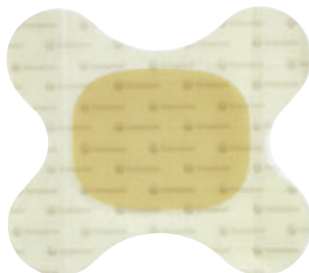

Opatrunki hydrokoloidowe



Comfeel® Plus Przezroczysty

Ochrona i gojenie ran o małym wysięku

Leczy i uszczelnia rany

Opatrunek Comfeel Plus Przezroczysty to skojarzenie wilgotnego środowiska gojącej się rany z możliwościami wchłaniania małego wysięku. Takie połączenie pozwala przyspieszyć proces gojenia się ran bez wysięku lub z jego niewielką ilością.







Doskonały w izolowaniu rany

Comfeel Plus Przezroczysty to ultracienki opatrunek zapewniający bezpieczną barierę przeciwko bakteriom, która minimalizuje ryzyko zakażenia i zapobiega niszczeniu delikatnej, nowo wytworzonej skóry.

- Comfeel Plus Przezroczysty to wygodny, elastyczny i cienki opatrunek, który zachowuje się jak druga skóra. Warstwa ochronna umożliwia pacjentowi prowadzenie normalnego życia.
- Comfeel Plus Przezroczysty posiada bezdotykowy system aplikacji, który sprawia, że nakładanie opatrunku jest łatwe, nawet w rękawiczkach ochronnych. Wodoodporna, przezroczysta warstwa ochronna opatrunku umożliwia pacjentowi kąpiel pod prysznicem i wykonywanie codziennych czynności.



Opatrunki Comfeel®

	nazwa	rozmiar (cm)	ilość w op.	refundacja	numer kat.	EAN	BLOZ
	Opatrunek Comfeel Podstawowy	10 x 10	10	TAK	032 130	5 708 932 208 208	9 052 219
		15 x 15	5	TAK	032 180	5 708 932 208 291	9 052 251
		20 x 20	5	TAK	032 230	5 708 932 208 352	9 052 261
	Opatrunek Comfeel Plus Podstawowy	10 x 10	10	NIE	031 100	5 708 932 207 645	9 036 847
		15 x 15	5	NIE	031 150	5 708 932 207 843	9 036 848
		20 x 20	5	NIE	031 200	5 708 932 208 048	9 036 849
		4 x 6	30	NIE	031 460	brak kodu EAN	9 036 853
	Opatrunek Comfeel Sacral Plus	18 x 20	5	NIE	032 850	5 708 932 208 857	9 036 846
	Opatrunek Comfeel Plus Konturowy	6 x 8	5	NIE	032 800	5 708 932 208 529	9 036 854
	Opatrunek Comfeel Plus Przezroczysty	5 x 7	10	NIE	035 300	5 708 932 209 663	9 036 844
		10 x 10	10	NIE	035 330	5 708 932 209 847	9 036 816
		9 x 14	10	NIE	035 360	5 708 932 210 003	9 036 845
		15 x 15	5	NIE	035 390	5 708 932 210 225	9 036 818
	Opatrunek Comfeel Plus Przezroczysty pooperacyjny	5 x 15	10	NIE	035 470	5 708 932 210 584	9 036 842
	Opatrunek Comfeel Plus Profilaktyczny PRD	Ø 7	10	NIE	033 500	5 708 932 209 045	9 036 858
		Ø 10	10	NIE	033 530	5 708 932 209 250	9 036 856

Opatrunki kontaktowe ze srebrem



Physiotulle® Ag

Skuteczność i delikatność w leczeniu ran



Physiotulle Ag to antybakteryjny opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki pokrytej wazeliną z cząsteczkami karboksymetylocelulozy. Zawiera sulfadiazynę srebra.

Stworzony z myślą o ranach zakażonych lub zagrożonych infekcją. Rekomendowany w przypadku ran ostrych (rany pooperacyjne, miejsca pobrania przeszczepu, urazy, otarcia, oparzenia I lub II stopnia) oraz trudno gojących się ran chronicznych – owrzodzenia podudzi, odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej.

Physiotulle Ag to opatrunek:

- o potwierdzonym działaniu antybakteryjnym,
- ze stałym i zrównoważonym uwalnianiem srebra,
- wspomagający odbudowę naskórka,
- zapewniający bezbolesną zmianę opatrunku,
- utrzymujący wilgotne środowisko gojenia rany.



Opatrunek kontaktowy ze srebrem Physiotulle Ag

	nazwa	rozmiar (cm)	ilość w op.	refundacja	numer kat.	EAN	BLOZ
	Physiotulle Ag	10 x 10	10	TAK	039 260	5 708 932 604 109	9 076 772
		15 x 15	10	TAK	039 272	5 708 932 604 130	9 076 769

Oczyszczanie rany



Purilon Gel

Wyjątkowe połączenie nawilżenia i wchłaniania



Purilon Gel jest hydrożelem zawierającym hydrokolooid i alginian. Nawilża tkankę martwiczą i wchłania nadmiar wysięku, martwicze części tkanek i resztki organiczne znajdujące się w ranie. To unikalne połączenie nawilżenia i wchłaniania poprawia naturalne, autolityczne oczyszczanie rany, eliminuje czynniki utrudniające gojenie się rany i zapewnia optymalne dla procesu gojenia warunki wilgotności.


Zastosowanie

Purilon Gel może być stosowany przez cały czas przebiegu leczenia, zapewniając optymalne warunki gojenia we wszystkich typach trudno gojących się ran (owrzodzeniach podudzi, odleżynach oraz niezainfekowanych ranach stopy cukrzycowej). Wyjątkiem są oparzenia III stopnia.


Sposób użycia

Oczyszczoną i osuszoną ranę, na którą zaaplikowano Purilon Gel, należy przykryć dodatkowym opatrunkiem. Przy ranach z małym i średnim wysiękiem należy wybrać opatrunek hydrokolooidowy np. Comfeel, Comfeel Plus lub Comfeel Plus Przezroczysty. W przypadku ran z dużym wysiękiem należy zastosować opatrunek zapewniający większą chłonność i zatrzymywanie wysięku, np. Biatain, Biatain Ag czy Biatain Super. Purilon Gel powinien być wymieniany w zależności od ilości wysięku. Jeśli rany są w fazie martwicy czarnej i oczyszczania, to opatrunek powinien być wymieniany przynajmniej co trzy dni. Purilon Gel można usunąć całkowicie z rany przez zastosowanie płynu do przemywania ran.

Opatrunek hydrożelowy Purilon

	nazwa	waga (g)	ilość w op.	refundacja	numer kat.	EAN	BLOZ
	Purilon Gel – żel hydrokolooidowy z alginianem	15	10	TAK	039 000	5 701 780 645 317	9 055 134

Środki pielęgnacyjne

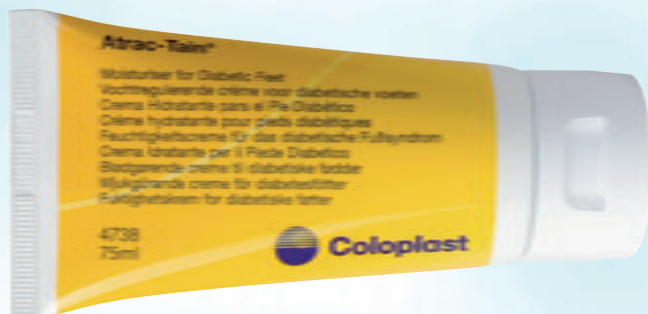

Atrac-Tain®

Krem nawilżający do pielęgnacji stopy cukrzycowej

Stworzony specjalnie dla stopy cukrzycowej

Atrac-Tain został opracowany dla chorych na cukrzycę – jego skuteczność została udowodniona w profilaktyce i leczeniu powikłań stopy związanych z cukrzycą.

Jest ważnym uzupełnieniem pielęgnacji skóry stóp. Pomaga zachować nienaruszony stan skóry zapobiegając jednocześnie pęknięciom i urazom.

Odżywia i nawilża skórę

Zawartość mocznika (10%) oraz kwasu mlekowego (4%) (AHA) zwiększa poziom nawilżenia w warstwie rogowej i przywraca elastyczność skóry od wewnątrz, bez zatykania porów.

Atrac-Tain nie zawiera konserwantów, barwników ani substancji zapachowych, co minimalizuje ryzyko reakcji alergicznych w kontakcie z wrażliwą skórą.


Sposób użycia

Krem jest łatwy w użyciu i nie pozostawia tłustych śladów.

Na początku leczenia, cienką warstwę kremu należy wmasowywać w skórę 2-3 razy dziennie. Gdy stan skóry ulegnie poprawie, stosowanie raz dziennie zapewni jej elastyczność. Nie powinien być stosowany między palcami, gdyż w tych miejscach skóra jest zbyt delikatna.

- Stworzony specjalnie dla stopy cukrzycowej.
- Złuszcza i zmiękcza bardzo suchą, popękana i zrogowaciałą skórę.
- Skuteczna prewencja przeciw owrzodzeniom stopy cukrzycowej.
- **Nie należy stosować na otwarte, niezagojone rany.**

Krem nawilżający do stopy cukrzycowej Atrac-Tain

	nazwa	pojemność (ml)	ilość w op.	refundacja	numer kat.	EAN	BLOZ
	Atrac-Tain	75	12	NIE	047 380	5 701 780 718 011	9 047 032

Odpowiedni opatrunek dla każdego etapu leczenia ran

Portfolio Coloplast zawiera opatrunki w wersjach nieprzylepnych i samoprzylepnych, w wielu kształtach i rozmiarach.

Opatrunki piankowe Biatain Ag ze srebrem przeznaczone są do ran zakażonych lub o podwyższonym ryzyku zakażenia.


Opatrunki piankowe Biatain są szczególnie polecane do ran z dużym wysiękiem, także dla osób z wrażliwą skórą.

Do ran o dużym wysięku, ale wymagających mocno przylegającego opatrunku, warto zastosować Biatain Super.

Biatain Alginate Ag zalecany jest do zakażonych ran głębokich.

Purilon Gel ma zastosowanie w ranach martwiczych. Opatrunki Comfeel są doskonałym rozwiązaniem dla rozmaitych typów ran o różnej intensywności wysięku.

Physiotulle Ag to opatrunek kontaktowy, który uwalniając srebro, jednocześnie przepuszcza wysięk do opatrunku wtórnego. Zapewnia bezbolesną zmianę opatrunku.

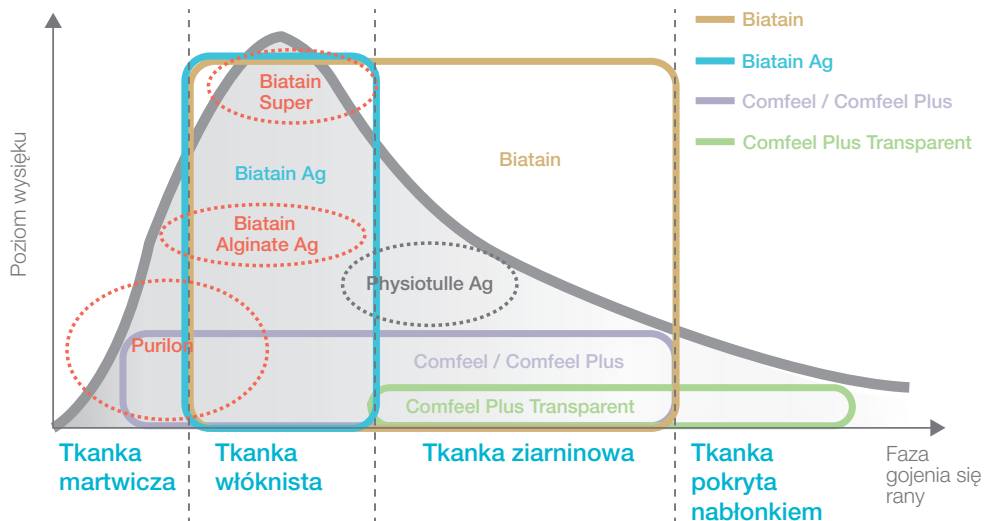

Wszystko zaczęło się w 1954 r. Pielęgniarka Elise Sorensen przejęła się dramatycznymi zmianami w życiu swojej siostry wynikającymi z operacji wyłonienia stomii. Thora nie miała odwagi wyjść z domu w obawie przed wyciekami ze stomii w miejscu publicznym. Elise zdecydowała się pomóc siostrze wyjść ze społecznej izolacji.

Jej pomysły to worek stomijny z przylepcem, który miał dokładnie przylegać do skóry. Miał on zapewnić szczelność i dać siostrze, podobnie jak tysiącom ludzi w tej samej sytuacji, szansę powrotu do normalnego życia.

Proste rozwiązanie o wielkim znaczeniu.

Dzisiaj nasza działalność obejmuje opiekę stomijną, opiekę urologiczną oraz opiekę nad pacjentem z ranami trudno gojącymi się. We wszystkich tych sferach prowadzi nas pasja i zaangażowanie Elise. Tak, jak ona pracujemy blisko pacjentów. Słuchamy ich potrzeb i reagujemy poprzez dostarczanie produktów i usług, by ich życie czynić łatwiejszym.



Jeżeli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji skontaktuj się z nami pod bezpłatnym numerem infolinii Telefonicznego Centrum Pacjenta Coloplast: 800 269 579.

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care



Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu intymnej opieki zdrowotnej. Bliska współpraca z użytkownikami daje nam możliwość ich dopasowania do osobistych potrzeb. Nasze rozwiązania dostarczamy osobom ze stomią, z nietrzymaniem moczu oraz ranami trudno gojącymi. Pracujemy na całym świecie, zatrudniając około 10 000 osób.

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast A/S. © 03/2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Coloplast Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa
tel. (22) 535 60 00
fax (22) 535 60 74

www.coloplast.pl